


Košíček do acetabula

Návod k použití

Košíček do acetabula typ II je určen pro umělé jamky kyčelního kloubu firmy BEZNOSKA, s.r.o. Košíček o průměru 46 mm je určen pro jamky průměru 44 mm. Košíček o průměru 52 mm je určen pro jamky průměru 49 mm. Košíček o průměru 56 mm je určen pro jamky průměru 54 mm. Implantát je možno fixovat pomocí šroubů zavedených do otvorů límce. Košíčky vyrobené z tvářené korozivzdorné oceli (ISO 5832-1) je nutné fixovat šrouby vyrobenými rovněž z tvářené korozivzdorné oceli (ISO 5832-1)

Popis výrobku

Košíček typ II je určen k implantaci do acetabula v případech, kdy by mohlo dojít k protrusi umělé jamky a pro některé kostní defekty. Košíček má límec, který má funkci opory o okraj acetabula. Límec a celý povrch košíčku je opatřen otvory o průměru 4,7 mm. Límec může být pouze v proximální části implantátu (II/A), nebo v plném tvaru (II/B). Košíček má dále v proximální části křídla pro případné uchycení šrouby a v distální části hák, pro vložení do foramen obturatum. Implantáty jsou vyráběny ve třech velikostech průměru 46, 52 a 56 mm z osvědčené tvářené korozivzdorné oceli (ISO 5832-1). Povrchová úprava je provedena tryskáním.

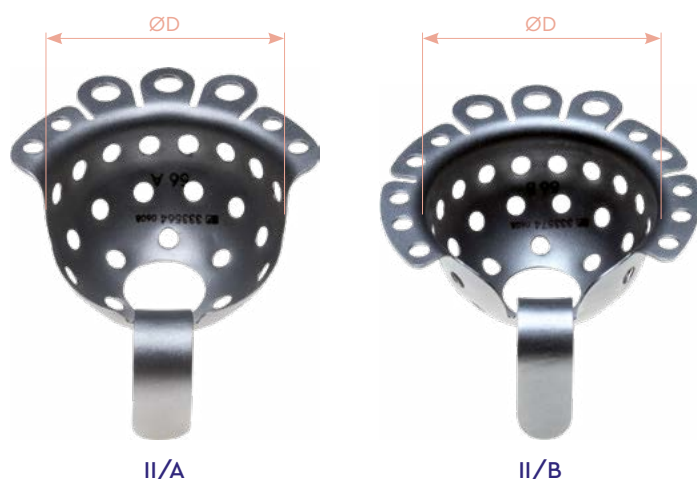

	ØD [mm]	Pro jamku ØD [mm]	Objednací číslo	Kód VZP
II/A	46	44	333560	97995
	52	49	333562	
	56	54	333564	
II/B	46	44	333570	97996
	52	49	333572	
	56	54	333574	